

お客様 各位

2017年7月13日  
株式会社 ニデック

### 更新プログラムの適用可能製品のご案内

ランサムウェアに対する更新プログラムの適用可能な製品につきましてお知らせいたします。

次の製品は、ランサムウェアの感染リスクの影響を受けない仕様となっています。

- ・ OPD-ScanIII

次の製品は、予防措置としてセキュリティ更新プログラムをインストールすることができます。  
インストール方法については、サポートセンターまでお問い合わせください。

- ・ AFC-330
- ・ MP-3
- ・ NAVIS-AZU (※)
- ・ NAVIS-CL (※)
- ・ NAVIS-HP (※)

※：お客様ご自身で予防措置としてセキュリティ更新プログラムをインストールする場合は、お使いの装置のWindowsの種類をご確認いただき、次頁の表から対応するセキュリティ更新プログラムをインストールお願いいたします。

次の製品は、予防措置としてセキュリティ更新プログラムをインストールすることができます。

- ・ RS-3000 Advance
- ・ RS-3000 Lite
- ・ RS-3000
- ・ RS-330
- ・ AFC-210/230 (NAVIS-Lite含む)
- ・ F-10 (NAVIS-Lite含む)
- ・ NAVIS-EX

これらの製品は、セキュリティ更新プログラムをインストールする対象のシステム(当社製品)で  
使用している Windows の種類により、セキュリティ更新プログラムが異なります。  
次頁の更新プログラムで動作を確認しています。



Eye & Health Care

**NIDEK CO., LTD.**

| Windowsの種類 |                      | セキュリティ更新プログラム |
|------------|----------------------|---------------|
| クライアント製品   | Windows XP           | KB4012598     |
|            | Windows Vista        | KB4012598     |
|            | Windows 7            | KB4019264     |
|            | Windows 8            | KB4012598     |
|            | Windows 8.1          | KB4019215     |
| サーバ製品      | Windows Server2003   | KB4012598     |
|            | Windows Server2008   | KB4012598     |
|            | Windows Server2008R2 | KB4019264     |
|            | Windows Server2012   | KB4019216     |
|            | Windows Server2012R2 | KB4019215     |

Windows の種類の確認方法、セキュリティ更新プログラムのダウンロードの仕方などは別紙「Windows 更新プログラム（MS17-010）適用手順書」をご確認お願いいたします。

次の製品は、マイクロソフトからセキュリティ更新プログラムが提供されていません。  
そのため、感染には十分注意していただくようお願いいたします。

- ・ ARK-10000
- ・ ARK-10000(OPD-Scan II)
- ・ ARK-9000
- ・ MP-1

ご使用の製品がリストにない場合、またはご質問がある場合は、当社のサポートセンターへお問い合わせください。

以上